

snúza® | PICO 2

HORDOZHATÓ OKOS BABAFIGYELŐ



MAGYAR

Használati útmutató
**OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT MIELŐTT
HASZNÁLNI KEZDI A KÉSZÜLÉKET**



PP2M0501

Fontos

Olvassa el a használati útmutatót mielőtt használni kezdi a készüléket. **Fontos: A Snuza Pico 2 egy babagondozási termék, nem orvostechnikai berendezés. Nem alkalmas betegség, sérülés vagy fogyatékoság diagnosztizálására, megelőzésére vagy megfigyelésére. A Snuza Pico 2 nem alkalmas együttalvánál.**

 **A SNUZA regisztrált védjegye a**
Snuza International (Pty) Ltd.-nek
Unit 8 - 11 Roeland Square,
Roeland Street
Cape Town, 8001
Dél-Afrika



Készült a Dél-Afriakai Köztársaságban
Szabadalmaztatott termék, minden jog
fenntartva

TARTALOMJEGYZÉK


1. FONTOS - ELŐSZÖR OLVASSA EL!	1
2. Bemutakozás	3
3. Óvintézkedések És Ellenjavallatok	5
4. A Készülék Részai	6
5. Gyors Üzembe Helyezési Útmutató (QSG)	8
6. Pelenka Illeszkedése És Elhelyezése	9
7. Működés	10
7.1 Snuza Pico 2 elhelyezése	10
7.2 Be- és Kikapcsolás	11
7.3 Szüneteltetés	11
7.4 Töltés	11
7.5 Jelzőfények	11
7.6 Mozgást jelző fény	12
7.7 Bluetooth kapcsolat	12
7.8 Elem jelzések	13
7.9 Riasztás jelzések	13
7.10 Töltés jelzőfények	15
7.11 Ruházat	15
8. Rezgő Riasztás	16
9. Akkumulátor	17
9.1 Elemjelző fény	17
9.2 Elem élettartam	17
10. Karbantartás	18
10.1 Eldobás	18
10.2 Tisztítás és tárolás	18
11. Problémamegoldás	19
11.1 Helytelen elhelyezés	19
11.2 Elem hiba	19
12. Lemondó nyilatkozat	19
13. Garancia	20
14. Szabályozási információk	20
15. Technikai leírás	21

1. FONTOS - ELŐSZÖR OLVASSA EL!

A Snuza Pico 2 készüléket úgy tervezték, hogy ha alvásnál felcsípteti a baba pelenkájára, vagy a gyermek pizsamájára, akkor a baba légzőmozgását, a testhőmérsékletét, alvási pozícióját és alvási állapotát folyamatosan figyelni tudja. Ha csatlakoztatva van, akkor ezeket az információkat a Bluetooth kapcsolaton keresztül az Ön okos készülékére továbbítja.

Legfeljebb 4 Snuza Pico 2 készüléket tud egyszerre egy okos készülékhez kapcsolni.

Egyidőben csak egy okos készülékkel tudja figyelni babáját.

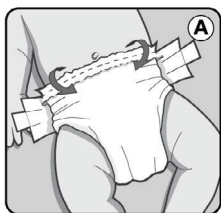

MINDIG:

Használjon megfelelő méretű pelenkát, hogy a Snuza Pico 2 készüléket biztonságosan el tudja rajta helyezni.

Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a Snuza Pico 2 felhelyezése előtt, hogy megfelelő vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a hashoz.



A Snuza Pico 2 felcsíptetéséhez először emelje fel a felső kart a csipesz kinyitásához. Helyezze a csíptetőt a visszahajtott pelenkára úgy, hogy teljesen rátolja, közben tegye az ujját a csipesz és a baba bőre közé, hogy a bőre ne csípdődjön be a csipesz és a pelenka/ruha közé. A csecsemő


bőre különösen rugalmas, így ez meglehetősen könnyen megtörténhet. Zárja be a csipeszt, és nyomja le a kart. És még egyszer győződjön meg róla, hogy nem csípte be a baba bőrét.

Kapcsolja be a Pico 2 -t a bekapcsológomb rövid megnyomásával.

Az összes jelzőfény villog, és egy indítási hang hallható.

Alternatív megoldásként kapcsolja be a Pico 2 -t az alkalmazás bekapcsológombjának megnyomásával. Az indítási hang néma lesz, ha az alkalmazáson keresztül kapcsolta be. Közvetlenül az indítás után az akkumulátor jelzőfénye villog, jelezve az akkumulátor töltöttségi állapotát. Ha még nem csatlakozik az alkalmazásához, nyomja meg a "Csatlakozás" gombot az alkalmazás főképernyőn a telefonhoz való kapcsolódás megkezdéséhez.

Annak érdekében, hogy a Pico 2 pontosan rögzítse a baba helyzetét, lépjen az alkalmazás beállításainak oldalára, és állítsa be, hogy a Pico 2 -t hol rögzítette a csecsemő pelenkáján vagy a gyermek pizsamanadrágján. A csecsemő alvási helyzetétől függően a Pico 2 -t a has bal vagy jobb oldalára is helyezheti. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Pico 2 pontosan fel van-e erősítve a nadrágra vagy a pelenkára.

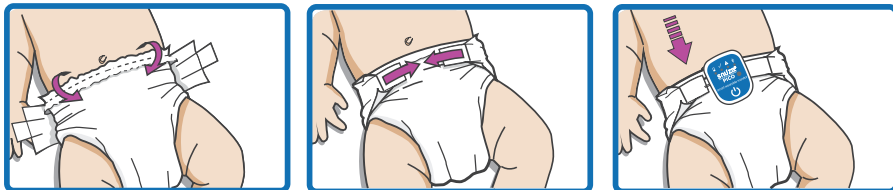

Mindig kövesse a fenti lépéseket annak érdekében, hogy a baba légzési mozgásait pontosan megfigyelhessék és rögzíthessék.

MEGJEGYZÉS:

Óvatosan kezelje a Snuzi Pico 2 -t, hogy elkerülje a csipesz sérülését. Mindig tartsa a töltő dobozban utazás során.

A téves riasztások elkerülése érdekében mindig szüneteltesse a Pico 2 -t szoptatás, pelenkacsere esetén, vagy amikor gyermekét a karjaiban tartja.

2. BEMUTATKOZÁS



Rendeltetésszerű használat:

A Snuzi Pico 2 egy hordozható babafigyelő, amely biztonságosan és kényelmesen figyeli gyermeke légzőmozgását alvás közben.

Felhasználó:

Ezt a berendezést a gyermek gondviselője általi használatra ajánlják. A gondviselőnek alaposan meg kell értenie az útmutatásokat és a biztonsági intézkedéseket a használati útmutatóban. Kérjük, ismerkedjen meg az utasításokkal, és ossza meg mindenkivel, aki gondozza gyermekét.

Használati környezet:

Otthoni biztonság:

A Snuzi Pico 2 biztonságosan és kényelmesen figyeli a gyermeke légzőmozgását alvás közben, hogy lehetőséget adjon egy korai beavatkozásra, ha szabálytalan légzőmozgást érzékel.

A Snuzi Pico 2 -t a baba pelenkájára kell csíptetni; nincsenek vezetékek, zsinórok, érzékelő lapok, és nem szükséges hozzá külső áramforrás.

A Snuzi Pico 2 nem alkalmas együttalvásnál, vagy egy ágyban alvásnál.

A Snuzi Pico 2 érzékeli a finom légzőmozgásokat és riaszt, ha nem érzékel mozgást 20mp-ig.

A Snuzi Pico 2 15 mp mozgáskimaradás után rezeg.

Ha a rezgéssel sikerült felébreszteni a babát, és érzékeli a készülék a légzést, akkor a Snuzi Pico 2 folytatja a mozgás megfigyelését. Három rezgés után, a Rezgő riasztás megszólal, hogy figyelmeztesse Önt, hogy gyermeke légzőmozgása 3 alkalommal is megállt 15mp-re. A rezgő riasztást egy rövid csippanás és a piros mozgást jelző led (1 2mp-kénti villogása jelzi). A rezgő riasztás alatt is tovább folytatódik a megfigyelés, de szükséges, hogy a gondozó megvizsgálja a gyermeket. A rezgő riasztás újraindítható a készülék ki- majd bekapcsolásával. Az ismételt rezgő riasztás esetén előfordulhat, hogy nem tudja használni az alkalmazást. Minden 15mp-es rezgő riasztás figyelmeztetés megjelenik az okos telefon alkalmazásban.

A Snuzi Pico 2 figyeli a baba helyzetét is, és bőrének hőmérsékletét is. Emlékeztetőül, a bőr hőmérséklete eltérhet a testhőmérséklettől.

3. ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ELLENJAVALLATOK

- Ez a készülék nem alkalmas betegség vagy állapot, mint pl. obstruktív apnoé megelőzésére vagy megfigyelésére.
- Külső forrásból előforduló mozgásokat, mint pl. babakocsi tolása, járműben utazás, vagy repülés, a Snuza Pico 2 érzékelője érzékelheti. Ne hagyatkozzon a Snuza Pico 2 re, ha mozgások fordulhatnak elő külső forrásokból.
- A megfigyelt baba egyedül kell aludjon a saját ágyában, különben a készülék annak a személynek a mozgását vagy légzését is érzékelheti, akivel egy ágyban alszik, és nem fog riasztani addig, amíg mozgást érzékel, még akkor sem, ha a baba légzése leáll.
- Rádiófrekvenciás készülékek, mint pl. mobiltelefonok, babaőrzők, kamerás babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, adó-vevők, vezeték nélküli routerek, stb. interferenciát okozhatnak a készülék légzés- vagy mozgásfigyelési működésében. Ne helyezze a készüléket 2m-nél közelebb ilyen rádiófrekvenciás készülékekhez, vagy elektromos kábelekhez.
- A készüléken semmiféle átalakítás nem engedélyezett.
- Egy készüléket csak egy baba megfigyelésére használjon.
- Az apró részek, melyeket nem rendeltetésszerű használat során távolítanak el, fulladást okozhatnak.
- Abban az esetben, ha a baba bőre érzékennyé válik ott, ahol a készülék érintkezik a baba bőrével, olvassa el a 7.11 fejezetet. Ha a bőrérzékenység továbbra is fennáll, lépjen velünk kapcsolatba az info@snuza.hu címen.
- Tartsa távol a háziállatoktól, kártevőktől és más gyermekektől, mert a károsodás nem megfelelő működést okozhat.
- Ne tegyen semmit a Hangszóró nyílásokba (5).
- Ne kerüljön semmiféle folyadék a Hangszóró nyílásokba.
- Ne használjon szükségtelenül nagy erőt a csipesz hajlításához/ kinyitásához/összezárásához (11).

4. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

ELŐLNÉZET



- 1 - Elemjelző fény
- 2 - Mozgást jelző fény (légzés)
- 3 - Riasztást jelző fény
- 4 - Bluetooth és Értesítések fény
- 5 - Hangszóró nyílások
- 6 - Bekapcsoló / Mód gomb
- 7 - Csiptető fogantyú

HÁTULNÉZET



- 8 - Érintésmentes érzékelő
- 9 - Töltő érintkezők
- 10 - Bőrhőmérséklet érzékelő
- 11 - Csiptető



- 12 - Töltő kábel
- 13 - Bekapcsolást jelző fény
- 14 - Dokkoló

5. GYORS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés: Pico 2 töltés

Csatlakoztassa a kábelt a töltő dokkolóhoz. Győződjön meg róla, hogy a Pico 2 készülék a töltő dokkolón van, és zárja le a doboz fedelét.

Hagyja a Snuzu Pico 2 -t tölteni 1 órán át.

2. lépés: Töltse le a Snuzu Connect alkalmazást

A Snuzu Connect alkalmazás elérhető iOS-en és Androidon.

Okoskészülék minimum követelmények:

- Legyen támogatott:

- Bluetooth 4.0
- Apple készülékek: iOS 8.0 vagy újabb
- Android készülékek: Android 5.0 vagy újabb

3. lépés: Snuzu Pico 2 regisztráció

A megerősítő e-mail-t a kiválasztott e-mail címére küldik. Ha megerősítette a regisztrációt, akkor a Snuzu weboldalra léphet, ahol hozzáadhatja a Pico 2 készülékét.

Adja hozzá a Pico 2 készülékét a Pico 2 képre kattintva, és töltsse ki a szükséges mezőket. A gyári számot a Snuzu Pico 2 készülék oldalán (ha felhajtja a csipeszt), vagy a csomagolás oldalán találja.

4. lépés: Snuzu Pico 2 elhelyezése

Mielőtt elhelyezi a Snuzu Pico 2 -t, hajtsa le a pelenka felső részét, és győződjön meg róla, hogy elég szorosan illeszkedik.

Nyissa fel a Snuzu Pico 2 csipeszt.

Amikor felteszi a Snuzu Pico 2 készüléket a pelenkára, akkor tegye az ujjait a baba pelenkája és a baba bőre közé. Ezáltal megelőzheti, hogy becsípje a baba bőrét. Rögzítse a helyére a Pico 2 -t.

Ellenőrizze, hogy a csipesz megfelelően zár, és jól van elhelyezve a pelenkán.

5. lépés: Kapcsolja be a Pico 2 -t és kezdje el a megfigyelést

Kapcsolja be a Pico 2 -t a bekapcsológomb rövid megnyomásával, míg az összes jelzőfény villog, és egy indítási hang hallható.

Alternatív megoldásként kapcsolja be a Pico 2 -t az alkalmazás bekapcsológombjának megnyomásával.

Közvetlenül az indítás után az akkumulátor jelzőfénye zölden villog, jelezve, hogy az akkumulátor fel van töltve.

Csatlakoztassa a Pico 2 -t az okostelefonhoz a főképernyőn a bekapcsoló gomb megnyomásával. Most már elkezdheti gyermeke megfigyelését az okostelefonjáról. Ha megfigyelés közben szüneteltetnie kell a Pico 2 -t, akkor vagy nyomja meg az alkalmazás szüneteltetését, vagy csiptesse le a készüléket, várjon egy sípolásra, és nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. A megfigyelés folytatásához vagy nyomja meg az alkalmazás lejátszás gombját, vagy csiptesse vissza a készüléket.

A Snuza Pico 2 alapfunkciói

A mozgás érzékelő fény zölden villog minden mozgásérzékelésnél. Ha nem érzékel mozgást 15mp-ig, akkor a Snuza Pico 2 rezegni kezd. Ha további 5mp-ig nem érzékel mozgást, akkor a Snuza Pico 2 készülék hanggal riaszt, figyelmeztetve Önt, hogy ellenőrizze gyermekét.

A Snuza Pico 2 alapfunkciói

A Snuza Connect alkalmazás arra lett kifejlesztve, hogy valós időben tájékoztassa Önt babája állapotáról. Állítsa be igényei szerint a figyelmeztetéseket az applikáció beállításáiban.

A figyelmeztetéseket az alkalmazásban elutasíthatja, ha balról jobbra csúsztatja. Kivéve a légzés és a leesés figyelmeztetéseket. Ezeket csak a készülék bekapcsoló gombjának megnyomásával tudja leállítani.

Ellenőrizze, hogy az okos készüléke csatlakozva van az alkalmazáshoz, hogy minden értesítést és figyelmeztetést megkapjon.

6. PELENKA ILLESZKEDÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

A megfelelő pelenkázás alapvető a Snuza Pico 2 - működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Snuza Pico 2 -t csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy hogy a felső része éppen a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka kilazulása miatt a készülék elvesztheti az érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A nagyon "teli", vagy nedves pelenka is okozhat kitérülést a pelenkán. Ha a baba az oldalán fekszik, akkor a Snuza Pico 2 -t a köldök és a matrac közé kell helyezni középre.

- Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy altassa a babát a hátán. Helyezze a Pico 2 -t a baba hasának közepe közelébe (1)
- Ha babája inkább a bal oldalán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 4. vagy 2. pozícióba.
- Ha babája inkább a jobb oldalán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 5. vagy 3. pozícióba.
- Ha babája inkább a hasán alszik, akkor rögzítse Pico 2 -t a 4. vagy 5. pozíció közelébe.



7. MŰKÖDÉS

7.1 A Snuza Pico 2 elhelyezése

Ha csatlakoztatja a Snuza Pico 2 készüléket, tegye az ujjait a baba pelenkája és a baba bőre közé. Győződjön meg róla, hogy a készüléket biztonságosan felcsíptette a pelenkára elkerülve a baba bőrét, hogy ne sértse meg a babát a felcsíptetéskor.



Csíptesse fel a Snuza Pico 2 -t a pelenkára, a csipeszt teljesen rátolva a pelenkára. Emelje fel az első kart (7) a csipesz kinyitásához. Helyezze a csipeszt a visszahajtott pelenkára úgy, hogy teljesen rátolja a csipeszt. Csatolja le a kart, és zárja be a csipeszt az alábbiak szerint:

Győződjön meg róla, hogy a Snuza Pico 2 közel van a baba hasához a köldök környékén, vagy a különböző alvási pozíciókban az oldalához közelebb. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy fektesse a babát a hátára, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja. <http://www.who.int/en/>

- Helyezze a hasára, ha háton alszik
- Helyezze a hasának oldalára, ha hason alszik

A Snuza Pico 2 -ben beépített riasztás van, ha a csipesz használat közben kinyílik. Mielőtt a riasztás megtörténik, a Snuza Pico 2 7mp-ig lassan csipog, hogy figyelmeztessen Önt, vagy zárja be a csipeszt, vagy aktiválja a szünet funkciót. Ha további 3mp-ig nyitva marad a csipesz, akkor a Csipesz Nyitva Riasztás aktiválódik.

fig. 1

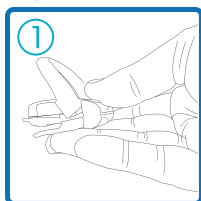


fig. 2



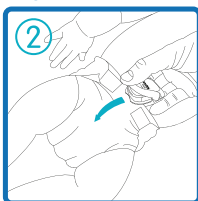


fig. 3

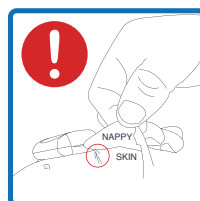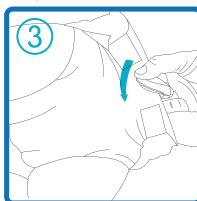

7.2 Be/Kikapcsolás

A Snuza Pico 2 készüléket bekapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6) rövid megnyomásával, és kikapcsolhatja a bekapcsoló gomb (6) megnyomásával és 2mp-ig történő nyomva tartásával. A megfelelő indítási és kikapcsolási hangot fogja hallani. (Isd. 7.5 fejezet)

Másik lehetőségként, a Snuza Pico 2 készüléket be- és kikapcsolhatja közvetlenül az alkalmazásban (ha ez engedélyezve van a beállításokban). Ez azt a kényelmet nyújtja, hogy ha elfelejtette bekapcsolni a készüléket, mikor ráhelyezte a pelenkára, akkor utána is be tudja kapcsolni, anélkül, hogy a babát zavarná.

7.3 Szünet

A Snuza Pico 2 -t arra tervezték, hogy figyelje a baba légzőmozgását, bőrének hőmérsékletét és a testhelyzetét, amíg alszik. Azonban, hogy elkerülje a téves riasztást, amikor nem alszik (mint pl. szoptatás alatt, vagy pelenkacseré közben, stb.), a "szünet" funkció lehetővé teszi, hogy szüneteltesse a megfigyelést ideiglenesen a felhasználó által beállított (alkalmazásban) ideig, pl. szoptatás idejére, vagy pelenkacseré közben.

A szünet funkciót bekapcsolhatja közvetlenül az alkalmazásban a Pause gomb megérintésével.

7.4 Töltés

A Snuza Pico 2 tároló doboza (12) egy olyan dokkoló, amire egyszerűen ráhelyezve feltölti a Snuza Pico 2 beépített akkumulátorát a dobozban.

7.5 Jelzőfények - Indítási és kikapcsolási sorrend

Bekapcsolás a bekapcsoló gombbal:

Ha a Snuza Pico 2 -t a bekapcsoló gombbal (6) bekapcsolja, a jelzőfények (1,2,3,4) felvillannak balról jobbra sorrendben, amit az indítási hang követ. Közvetlenül az indítási hang után az elemjelző fény (1) villog, hogy jelezze az elem állapotát, miután bekapcsolta. Az elemjelző fény a következőket jelenti:

	Zöld	Elem jó
	Sárga	Az elem töltöttsége alacsony, de még pár órát működik
	Piros	Az elem töltöttsége nagyon alacsony, fel kell tölteni. A piros fényt a kikapcsolási hang követi - az elem lemerült a működéshez, és a Snuza Pico 2 automatikusan kikapcsol. Kérjük, hogy töltsse fel rögtön.

Bekapcsolás az alkalmazással:

Ha a Snuza Pico 2 -t az alkalmazáson keresztül kapcsolja be, akkor nincs indítási dallam, de a jelzőfények felvillannak a megfelelő sorrendben. Az elem töltöttségi információ megjelenik az applikáció oldalán, így nem szükséges távolról megfigyelni az elem jelzőfényt bekapcsoláskor. Kikapcsolás a gombbal - Ha a Snuza Pico 2 -t a gombbal kikapcsolja, akkor a jelzőfények jobbról balra felvillannak, és kikapcsolási dallamot fog hallani.

Kikapcsolás az alkalmazással - Ha a Snuza Pico 2 -t az alkalmazáson keresztül kapcsolja ki, akkor nincs hang, de a jelzőfények felvillannak a megfelelő sorrendben.

7.6 Mozgást jelző fény

A mozgást jelző led (2) villog, ha mozgást érzékel.

	Zöld	Erős légzőmozgásjelet érzékel
	Sárga	Gyenge légzőmozgásjelet érzékel
	Piros	Nagyon gyenge légzőmozgásjelet érzékel

7.7 Bluetooth kapcsolat

	Bluetooth jelzőfény (4)	Kék: Minden 2 mp-ben kéken villog, ha az okostelefonhoz/tabletához csatlakozik
	Rózsaszín	Rózsaszínűen villog minden 2mp-ben a szüneteltetés alatt
	Rózsaszínnel villog	Egymás után hatszor rózsaszínűen villog az indítás után, hogy figyelmeztesse Önt egy fontos értesítésre a szerveren. Nézze meg ezt a fontos üzenetet a Snuza Connect oldalon a belépés után (connect.snuza.com)

7.8 Elem jelzőfények

Indításkor - lsd. feljebb a "Bekapcsolási és kikapcsolási jelzőfények" részénél

Ha az elem töltöttségi szintje alacsony (mialatt a Snuza Pico 2 be van kapcsolva):

Az elem jelzőfény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer csippan minden 60. mp-ben

Ha az elem töltöttségi szintje kritikus (mialatt a Snuza Pico 2 be van kapcsolva):

Az elem jelzőfény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer csippan minden 10. mp-ben

Töltés közben:

Amíg tölt, addig az elem jelzőfény zölden villog.

Ha a töltés befejeződött, akkor az elem jelzőfény a Snuza Pico 2 készüléken folyamatosan zölden világít.

7.9 Riasztások és figyelmeztetések

Felhívjuk figyelmét: A gondozónak haladéktalanul el kell látnia a babát, ha megszólal a riasztás. A figyelmeztetéseket és a riasztások beállításait az alkalmazás beállításainak szerkesztésével testreszabhatja. A Pico 2 riaszt minden kritikus eseményről, függetlenül attól, hogy a Pico 2 csatlakozik-e az alkalmazáshoz, vagy sem. A telefon csak akkor jelzi a figyelmeztetéseket és riasztásokat, ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2-höz.

Rezgés: Ha nem érzel légzőmozgást 15mp-ig, akkor a Pico 2 rezegni kezd.

Légzéskimaradás miatti riasztás:

Ha 20mp-ig nem érzel légzőmozgást, akkor a Pico 2 riasztani kezd, és a Mozgást jelző lámpa villogni kezd

Alacsony légzésszám riasztás:

Ez a riasztás az alkalmazásban konfigurálható, és riaszt, amikor a légzés mozgási sebessége a beállított küszöbérték alá esik vagy fölé emelkedik. Ez a figyelmeztetés csak az okostelefonon jelenik meg, és csak akkor hallható, ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2-höz.

Hallható "kattogás":

Ez a funkció arra készíti a Pico 2 -t, hogy minden légzőmozgásnál hallható "kattogás" hangot bocsásson ki. Ezt a funkciót vezérelheti az alkalmazásban a Légzésőmozgás beállítások alatt, vagy magával a Pico 2 -vel a Bekapcsoló / Mód gomb rövid megnyomásával (6). A gomb minden egyes megnyomásakor a "kattogás" hangereje növekszik, a negyedik megnyomásával kikapcsolja, hosszabb hangjelzéssel.

Bőr hőmérséklete:

Az alkalmazásban beállítható a riasztás, ha a bőr hőmérséklete a beállított küszöbérték alá esik vagy fölé emelkedik. Ez a figyelmeztetés csak az okostelefonon jelenik meg, és csak akkor hallható, ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2-höz.

Testhelyzet:

Ez a riasztás beállítható az alkalmazásban, hogy értesítse Önt, amikor a baba egy meghatározott testhelyzetbe kerül, például hasra fordul, ami nem ajánlott a biztonságos alvási technikák részeként. Ez a figyelmeztetés csak az okostelefonon jelenik meg, és csak akkor hallható, ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a Pico 2-höz.

Csipető nyitva:

Abban az esetben, ha a csipető véletlenül kinyílik megfigyelés közben, figyelmeztető hangjelzés hallható. Ha nem csukódik vissza 20mp-en belül, akkor folyamatosan 3 sípoló hang hallható és a figyelmeztető jelzőfény is villog.

Leesés:

Ez a riasztás megjelenik a Pico 2-n és az okostelefonon is, ha csatlakoztatva van. Ez a riasztás figyelmezteti Önt, ha esést észlel a Pico 2-n. Ez a funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva a Pico 2-n, de kikapcsolható az alkalmazásban a Pico 2 beállításokban.

A telefon hangereje alacsony:

Ha a telefon hangerejét túl alacsonyra állítja, egy alkalmazáson belüli értesítés figyelmezteti Önt. Hangosítsa fel a telefon hangerejét, hogy biztosan hallja az összes értesítést. Az okostelefonon lévő alkalmazás a fenti riasztások mellett riaszt. Beállíthatja az alacsony és a magas bőrhőmérséklet miatti, a légzésszám miatti és a testhelyzet miatti riasztásokat.

7.10 Töltést jelző fények

Ha a töltő csatlakozik az áramforráshoz, akkor az áramforráshoz csatlakoztatva jelzőfény (14) a dokkolón világít. Ez a jelzőfény nem változik, ha a Snuza Pico töltőn van, vagy nincs. Ez csak azt jelzi, hogy a töltő áram alatt van. Annak meghatározásához, hogy a Snuza Pico tölt-e a dokkolón, lásd az előző részt.

7.11 Ruházat

A Snuza Pico 2 -t felcsíptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy a rugalmas bugyi/nadrág derékrészére.

Nem ajánlott, hogy ruha legyen a baba bőre és a Snuza Pico 2 között. A Snuza Pico 2 a ruha alatt használható, nem felette.

A túl sok ruha tompíthatja a riasztás hangját. Győződjön meg róla, hogy biztosan hallható a riasztás, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy be van takarva.

1.1 REZGŐ RIASZTÁS

Megjegyzés: Ha az okostelefon csatlakozik a készülékhez, akkor minden figyelmeztetés és riasztás úgy, mint a valós idejű adatok láthatóak az alkalmazásban. Megfigyelés alatt, ha 15mp-ig nem érzékel mozgást a készülék, akkor a Snuzza Pico 2 rezegni kezd. Ha a mozgás újraindul a következő 5mp-ben, akkor a Mozgást jelző fény (2) pirosan villog minden mozgásnál, jelezve, hogy volt egy 15mp-es mozgáskimaradás. A rezgő riasztással 3 ilyen rezgés aktiválás majd sikeres mozgás újraindulás után a mozgást jelző lámpa (2) pirosan villog minden 2.mp-ben és egy csippanó hangot ad. Ez figyelmeztet arra, hogy három alkalommal 15mp-re leállt a baba mozgása, majd a Snuzza Pico 2 rezgése után újra mozogni kezdett. Megjegyzés:- A megfigyelés folytatódik a rezgő riasztás alatt is. A rezgő funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor a Snuzza Pico 2 készüléket bekapcsolja.

9. AKKUMULÁTOR

9.1 Elemjelző fény

Ha az elem működés közben lemerül, akkor az elemjelző led (1) az alábbiak szerint villog:

Az elemjelző fény (1) pirosan villog minden 5.mp-ben és kétszer csippan minden 60 mp-ben. Ha az elem töltöttségi szintje kritikusra csökken az elemjelző fény pirosan villog minden 5mp-ben és kétszer csippan 10 mp-ként. Töltse fel az elemet a következő használat előtt (Isd. 10.3. Elem töltése c. fejezet). A csippanást kikapcsolhatja a Bekapcsoló (Power)/mode gomb egyszeri megnyomásával.

9.2 Elem élettartam

A Snuza Pico 2 -ben újratölthető elem van, és kb. 40óráig tart egy töltéssel. Azonban az elem élettartama függ a használatától. A Pico 2 akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében töltse fel a Pico 2 készüléket legalább 5 havonta.

A Snuza Pico 2 készülék tároló doboza egy egyedi dokkoló, ami feltölti a beépített elemeket, a Snuza Pico 2 egyszerű elhelyezésével a dobozban.

10. KARBANTARTÁS

10.1 Ártalmatlanítás:

A készüléket és a csomagolást az országban, az elemek ártalmatlanítására vonatkozó megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell eldobni és újrahasznosítani.

10.2 Tisztítás és Tárolás:

- Finoman törölje le egy nedves ruhával a szennyeződések. Enyhe szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
- Ne használjon más tisztítószeret, mert azok káros vegyszereket tartalmazhatnak.
- A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
- Szállításkor tartsa a Snuzza Pico 2 készüléket a tároló dobozban. Ne tárolja hosszabb ideig a töltő dobozban és ne tárolja párás helyen.

Az elem élettartamának megőrzéséhez:

- Teljesen töltsse fel a Snuzza Pico 2 -t, mielőtt hosszabb időre elrakná.
- Ne engedje teljesen lemerülni a Snuzza Pico 2 készüléket és ne hagyja lemerülve hosszabb ideig.

11.PROBLÉMAMEGOLDÁS

11.1 Helytelen elhelyezés

Elhelyezését a pelenkán (Isd. 6.fejezet Pelenka illeszkedése és 7.1. fejezet A Snuza Pico 2 elhelyezése).

11.2 Elem hiba

Az elemjelző fény (1) piros

Kérjük, hogy látogassa meg a www.snuza.com oldalt a további információkért.

12.LEMONDÓ NYILATKOZAT

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket. A Snuza International (Pty) Ltd., és annak tagjai, alkalmazottai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói, forgalmazói és egyesületei ("SNUZA") nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelősségek ezáltal kizártak. A vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.

13.GARANCIA

A Snuza International (Pty) Ltd garantálja, hogy ez a termék mentes az anyaghibáktól, és nem hibásodik meg a működésében az eredeti vásárlás dátumától, amit blokkal vagy számlával igazolni szükséges, számított első 12 hónapban. A garanciális kötelezettség a termék cseréjére, javítására vonatkozik, de nem vonatkozik a szállítási költségekre. A garancia kiterjed minden országra, ahol a terméket forgalmazzák. A termék használója elfogadja az ebből következő felelősséget. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális jogok megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik az elemre, a helytelen alkalmazásra, manipulálásra, a helytelen használatból eredő és a szállítási sérülésekre.

14.SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

FCC megfeleléségi nyilatkozat a Snuza Pico 2 készülékhez és a töltő dokkolóhoz.

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részében leírtaknak.

Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik:

- (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát
- (2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, ami nem kívánatos működést idézhet elő.

Ez a készülék megfelel az FCC RF sugárzás szabályozatlan környezetben való kitettségére vonatkozó határértékeinek. Kanadai szabályozási nyilatkozat a Snuza Pico 2 készülékhez és a töltő dokkolóhoz

Canadian regulatory statement for the Pico 2 and charging cradle.

A termék megfelel a vonatkozó Industry Canada RSS szabványainak:

Üzemeltetése az alábbi két feltétel függvényében történik.

- (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát
- (2) a készüléknek el kell viselni bármilyen vett interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, ami nem kívánatos működést idézhet elő.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with the safety requirements for RF exposure in accordance with RSS-102 Issue 5 for portable use conditions. Cet appareil conforme avec les règlements et exigences des radiofréquences en conformité avec CNR-102 5e édition pour condition d'usage portatif

15. TECHNIKAI ADATOK

	BF típusú alkatrészek
	CE jelzés az CE 5/1999/EC, 95/2001/EC, 336/89/EEC (TV Rheinland)-nek megfelelően
	FCC jelzés a Federal Communications Commission - USA szerint.
IP52	A készülék burkolata cseppálló
IC: 21736-01	Ez a készülék alkalmazza az Industry Canada licence-exempt RSS szabványait
	Készülék gyári száma (az első két szám a gyártás évét jelöli)
	Lsd. Az Ártalmatlanítás c. fejezetet a készülék ártalmatlanításával kapcsolatban
Átlagos élettartam:	A Snuzza Pico 2 átlagosan 5évig működik a gyártástól számítva.
Környezeti feltételek:	Megengedett környezeti működési feltételek: · Hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között. · Páratartalom: %15 és %93 között, nem kondenzáló, · Légnyomás: 700HPA és 1060HPA között

Megengedett környezeti feltételek szállításkor és tároláskor a védőtokból kivéve használatok között:	· 25 °C relatív páratartalom szabályozás nélkül; és · °70+C -%93os páratartalomnál, nem lecsapódó;
Áramforrás:	Belső áramforrású Elem specifikáció: Lithium Polymer
Hangnyomás szint:	85dBm 10cm-nél



Kapcsolat:

A Snuza Pico 2 működésével vagy karbantartásával, esetleg meghibásodással kapcsolatosan keressen minket:

Weboldal:

www.snuza.com/contact.php vagy www.snuza.hu

Email:

support@snuza.com

Telefon:

+27 (0)21 461 8530

Cím:

Unit 8 - 11 Roeland Square,
Roeland Street,
Cape Town 8001,
South Africa